



W zawodach niosących ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami biologicznymi i chemicznymi oraz w celu ochrony przed skażeniem dotykanych powierzchni niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie.

Master Glove to rękawice pozwalające na komfortowe i bezpieczne wykonywanie obowiązków. Mają uniwersalny kształt, który pasuje na obie dłonie, a rolowany mankiet ułatwia zakładanie.

- rękawice diagnostyczne lateksowe
- rękawice diagnostyczne nitylowe
- rękawice diagnostyczne winylowe
- rękawice chirurgiczne

W obliczu różnorodnych potrzeb klientów i zastosowań rękawic diagnostycznych, rękawice Master Glove dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej i rozmiarowej.



Aby zapewnić najwyższą jakość gwarantującą bezpieczeństwo i satysfakcję użytkowników, oferowane przez SORIMEX rękawice spełniają wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej. Rękawice odpowiadają wymaganiom zharmonizowanych norm: EN 455, EN 374, EN 420. Każda zamówiona partia rękawic podlega ścisłej kontroli jakościowej, a wyniki badań potwierdzone są stosownymi dokumentami.



Rękawice diagnostyczne



Rękawice diagnostyczne lateksowe

- do badań ambulatoryjnych, czynności pielęgnacyjnych, terapeutycznych
- środek ochronny w kosmetyce i przy pracach gospodarczych
- znakomite parametry użytkowe jak rozciągliwość, elastyczność



Rękawice diagnostyczne nitylowe

- do prac medycznych i w instytutach badawczych
- środek ochrony w mechanice samochodowej
- nie wchodzi w reakcje z ropopochodnymi olejami, smarami, rozpuszczalnikami
- nie zawierają lateksu




Rękawice diagnostyczne winylowe

- do czynności pielęgnacyjnych, utrzymania czystości
- do przemysłu spożywczego i gastronomii
- odporne na tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- dla osób z alergią na lateks

Instrukcja użycia

Przeprowadź czynności higieny rąk odkażając ręce preparatem na bazie alkoholu lub myjąc je mydłem i wodą.

1. Wyjmij rękawicę z oryginalnego opakowania.
2. Dotknij jedynie ograniczoną powierzchnię rękawicy w części nadgarstka (na samej górze mankietu).
3. Nałóż pierwszą rękawicę.
4. Wyjmij drugą rękawicę gołą ręką dotykając jedynie ograniczonej powierzchni rękawicy w części nadgarstka.
5. Odwinię zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami ręki w rękawicy umożliwiając nałożenie rękawicy na drugą rękę.
6. Po nałożeniu rękawic, nie należy dotykać rękami niczego, co nie zostało określone we wskazaniach lub warunkach używania rękawic.
7. Aby zdjąć rękawicę, chwyć ją palcami na wysokości nadgarstka, nie dotykając skóry przedramienia i ściągnij ją z ręki wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch.
8. Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce, która nadal jest w rękawicy i ruchem ślizgowym włóż palec drugiej – gołej ręki między rękawicę a nadgarstek.
9. Zdejmij drugą rękawicę zwijając ją wzdłuż dłoni a następnie naciągnij ją na trzymaną w palcach rękawicę.

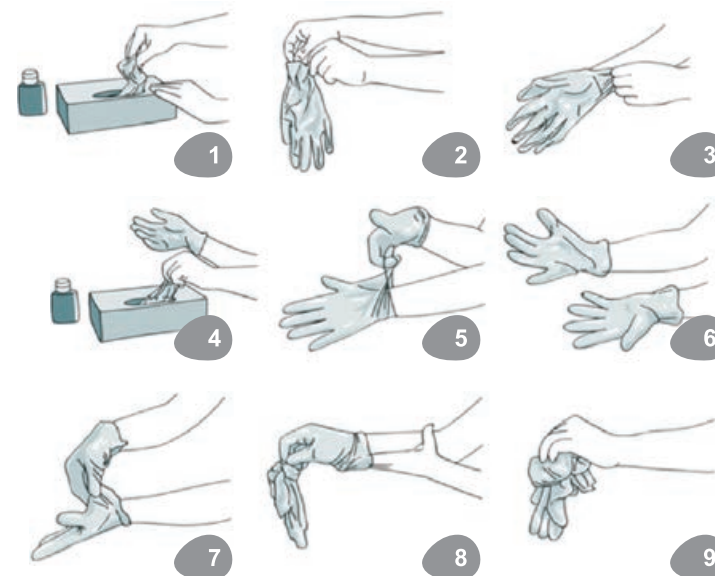



latex classic



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



latex classic blue



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



latex simple



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



latex PF chlori



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



latex PF poly



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



nitrile PF



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. III/Typ B



nitrile PF pink



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. III/Typ B



nitrile PF black



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. III/Typ B



nitrile PF simple



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



vinyl simple



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



vinyl PF simple



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



vinyl PF simple blue



x100

AQL 1,5
kl. I
kat. I



pudrowane



bezpudrowe



gładkie



teksturowane

x100

ilość w opakowaniu

kl. I

klasa wyrobu MDD

kat. III
Typ B
kategoria PPE

Produkuwane zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej.



REKAWICE
MEDYCZNE





Rękawice chirurgiczne lateksowe

- wersja **solid** – wzmocniona dodatkową warstwą polimeru
- sterylizowane metodą radiacyjną
- w pełni anatomiczny kształt, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń
- mikroteksturowana powierzchnia gwarantująca pewny chwyt w środowisku operacyjnym
- przedłużony mankiet z wzmocnionym rolowanym brzegiem

latex PF aseptic



x50

AQL

1,0

kl. IIa

kat. III/Typ B



CE 0120

CE 2777

latex aseptic



x50

AQL

1,0

kl. IIa

kat. III/Typ B



CE 0120

CE 2777

latex PF aseptic solid



x50

AQL

1,0

kl. IIa

kat. III/Typ B



CE 0120

CE 2777

latex aseptic solid



x50

AQL

1,0

kl. IIa

kat. III/Typ B



CE 0120

CE 2777

Rękawice należy zakładać na dokładnie zdezynfekowane i osuszone dłonie.

1. Otworzyć kopertę zewnętrzną i wyjąć zapakowane w kopertę wewnętrzną rękawice – najlepiej, gdy ten etap jest wykonywany przez inną osobę. Trzymając w ręce skrzydełka koperty, otwórz opakowanie.
2. Lewą ręką przytrzymaj wywinęty mankiet prawej rękawicy. Włóż prawą rękę do prawej rękawicy.
3. Prawą rękę włóż w wywiniecie mankietu lewej rękawicy. Unieś jednocześnie rękawicę do góry.
4. Trzymając w wywinieciu lewej rękawicy prawą rękę, włóż lewą rękę do lewej rękawicy.
5. Prawą ręką wywin do wyprostowania i naciągnij mankiet lewej rękawicy na mankiet fartucha.
6. W wywinieciu prawej rękawicy włóż lewą rękę ubraną w rękawicę. Wywin do wyprostowania i naciągnij mankiet prawej rękawicy na mankiet fartucha.
7. Rękawice zdejmuje się przez chwycenie palcami jednej ręki za zewnętrzną część rękawicy na drugiej dłoni częściowo naciągając ją. Następnie zsuń rękawicę, rolując część zewnętrzną do środka. Nigdy nie zsuwaj jej całkowicie.
8. Częściowo zrolowaną i zsuniętą rękawicą chwyc za drugą rękawicę i postępuj podobnie jak z poprzednią. Wywinęta i częściowo zsuniętą rękawicę naciągnij na tę drugą

