

Instrukcja użycia i przechowywania adapterów NIBP

1. Opis ogólny

Adaptory NIBP są elementami stosowanymi przy nieinwazyjnym pomiarze ciśnienia krwi (NIBP) służącymi do połączenia mankietu z aparatem.

2. Charakterystyka

Adaptory NIBP obejmują łączniki i przewody powietrza. Ich konstrukcja jest dostosowana do konstrukcji aparatu i mankietu, z którą mają współpracować.

3. Zasady użycia

Dopasować typ i rozmiar adaptera, do mankietu i do urządzenia, z którym ma współpracować.

Upewnić się, że wykonane połączenie jest trwale i szczelne a przewody powietrza nie mają ostrych przegięć.

W przypadku, gdy w wyniku używania adaptera nastąpiło jego uszkodzenie, należy wymienić adapter na nowy.

4. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Czyszczenie

Zewnętrzna powłokę adaptera należy delikatnie myć przy pomocy miękkiej szmatki zamoczonej w ciepłej wodzie, jeżeli potrzeba z dodatkiem łagodnych środków myjących lub środków dezynfekujących. Do czyszczenia można użyć również 70% alkoholu izopropylowy. Przed użyciem adapter powinien wyschnąć.

Do mycia nie należy stosować środków zawierających materiały ściernie, środków żrących, rozpuszczalników ani innych produktów, które mogłyby uszkodzić adapter.

Dezynfekcja

Materiałami zalecanymi do dezynfekcji adapterów są 70% alkoholu izopropylowy lub 70% etanol.

Mogą być również stosowane inne środki dezynfekujące przeznaczone do dezynfekcji wyrobów medycznych, jeżeli nie wpływają negatywnie na adapter (przed ich zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia tych środków).

Steryliczacja

Preferowaną metodą jest sterylizacja za pomocą tlenu etylenu (postępować zgodnie z procedurą dostawcy sterylizatora gazowego). Po sterylizacji, przed użyciem, należy adapter bezpiecznie i dokładnie wywietrzyć.

Steryliczacja innymi metodami mogłaby trwale uszkodzić adapter.

5. Przechowywanie

Adaptory należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0°C do 50°C i względnej wilgotności powietrza od 20% do 80%

Przewody powietrza nie będące w użyciu, powinny być luźno zwinięte, bez ostrych przegięć.

6. Ostrzeżenia

Adaptory w stanie dostawy nie są poddawane procesowi sterylizacji.

Aparatura, do której adapter jest podłączany powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. Przy instalacji adaptera należy postępować zgodnie z instrukcją użycia urządzenia.

Podłączenie adaptera do aparatu i mankietu powinien dokonywać personel posiadający odpowiednią wiedzę.

Utylizacja zużytego adaptera powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Instrukcja użycia i przechowywania adapterów NIBP

7. Gwarancja

Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzedaży.

Okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia i przechowywania.

SORIMEX



SORIMEX sp. z o.o. sp. k.
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
tel. +48 56 657 77 20, fax +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl www.sorimex.eu



Data ostatniej weryfikacji
2012-08-08