

Adapter NIBP



SORIMEX
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland
tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl ♦ www.sorimex.eu



Data ostatniej weryfikacji
Date of last verification
Letzte Verifikation
Число последней проверки
2016-01-01

1. Opis ogólny

Adaptory NIBP są elementami stosowanymi przy nieinwazyjnym pomiarze ciśnienia krwi (NIBP) służącymi do połączenia mankietu z aparatem.

2. Charakterystyka

Adaptory NIBP obejmują łączniki i przewody powietrza. Ich konstrukcja jest dostosowana do konstrukcji aparatu i mankietu, z którą mają współpracować.

3. Zasady użycia

Dopasować typ i rozmiar adaptera, do mankietu i do urządzenia, z którym ma współpracować.

Upewnić się, że wykonane połączenie jest trwałe i szczelne a przewody powietrza nie mają ostrych przegięć.

W przypadku, gdy w wyniku używania adaptera nastąpiło jego uszkodzenie, należy wymienić adapter na nowy.

4. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Czyszczenie

Zewnętrzną powłokę adaptera należy delikatnie myć przy pomocy miękkiej szmatki zamoczonej w ciepłej wodzie, jeżeli potrzeba z dodatkiem łagodnych środków myjących lub środków dezynfekujących. Do czyszczenia można użyć również 70% alkoholu izopropylowy. Przed użyciem adapter powinien wyschnąć.

Do mycia nie należy stosować środków zawierających materiały ściernie, środków żrących, rozpuszczalników ani innych produktów, które mogłyby uszkodzić adapter.

Dezynfekcja

Materiałami zalecanymi do dezynfekcji adapterów są 70% alkoholu izopropylowy lub 70% etanol.

Mogą być również stosowane inne środki dezynfekujące przeznaczone do dezynfekcji wyrobów medycznych, jeżeli nie wpływają negatywnie na adapter (przed ich zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia tych środków).

Sterylicacja

Preferowaną metodą jest sterylizacja za pomocą tlenu etylenu (postępować zgodnie z procedurą dostawcy sterylizatora gazowego). Po sterylizacji, przed użyciem, należy adapter bezpiecznie i dokładnie wywietrzyć.

Sterylicacja innymi metodami mogłaby trwale uszkodzić adapter.

5. Przechowywanie

Adaptory należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0°C do 50°C i względnej wilgotności powietrza od 20% do 80%

Przewody powietrza nie będące w użyciu, powinny być luźno zwinięte, bez ostrych przegięć.

6. Ostrzeżenia

Adaptory w stanie dostawy nie są poddawane procesowi sterylizacji.

Aparatura, do której adapter jest podłączany powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. Przy instalacji adaptera należy postępować zgodnie z instrukcją użycia urządzenia.

Podłączenie adaptera do aparatu i mankietu powinien dokonywać personel posiadający odpowiednią wiedzę.

Utylizacja zużytego adaptera powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

7. Gwarancja

Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia i przechowywania.

Symbole / Symbols / Symbole / Символы

REF

Numer katalogowy
Catalogue number
Katalognummer
Каталожный номер

LOT

Numer partii
Batch code
Lotnummer
Номер партии



Ostrzeżenie
Caution
Warnung
Предостережение



Wytwórca
Manufacturer
Hersteller
Производитель



Data produkcji - włączona w numer partii, stanowi cyfry od 2 do 7 numeru LOT
Date of manufacture - included in the bath code, these are numbers from 2 to 7 LOT number
Herstellungsdatum - in der Lotnummer enthalten, die Zahlen 2-7 Lotnummer
Число производства - включены в номер партии, число от 2 до 7 Номер LOT



Ograniczenia temperatury
Temperature limit
Temperaturbeschränkungen
Ограничения температуры



Zapoznać się z instrukcją użytkowania
Consult instructions for use
Sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen
Ознакомиться с инструкцией обслуживания



Chronić przed światłem słonecznym
Keep away from sunlight
Vor Sonnenstrahlen schützen
Предохранять от солнечного света



Chronić przed wilgocią
Keep dry
Vor Feuchtigkeit schützen
Предохранять от сырости